



Motilo Sattelvarianten

Der Motilo ist eine Lauflernhilfe für Kinder mit geringer Bewegungsaktivität und fehlender Körperhaltung. Er unterstützt Kinder mit Hypotonien (mangelnder Muskelspannung- oder -stärke) wie bei Infantiler Zerebralparese (ICP) sowie neurologischen oder neuromuskulären Erkrankungen. Dabei hängt die Wahl des passenden Sattelkorsetts von der Grundmuskulatur des Kindes ab. Im Laufe der Zeit und in Abhängigkeit von der Entwicklung können die Sattelkorsetts auch gegeneinander ausgetauscht werden, um eine effiziente Versorgung zu erreichen.



Grundsätzlich besteht jeder Motilo aus

1. einem anpassbaren verstellbaren Sattelkorsett
2. einem höhenverstellbaren Untergestell mit Lenkergriff (4 verschiedene Größen)
3. einer winkelverstellbaren Sattelkorsetthalterung (60° - 90°)

Motilo Original

Beim Motilo Original handelt es sich um einen maßgefertigten Monoblock mit der größtmöglichen Unterstützung. Die ventrale und dorsale (bauch- und rückenständige) Stützen sind im Schritt fest **1** verbunden. Im Zusammenspiel mit der lateralen Pelotte wird eine äußerst stabile Führung im Becken erreicht. Die lateralen Pelotten **2** können je nach entwicklungsrelevanter Notwendigkeit in der Höhe, Tiefe und Breite definiert werden. Die abklappbare Rückenstütze **3** vereinfacht das Hineinsetzen und Herausheben des Kindes. Je nach Bedürfnis und Entwicklung des Kindes kann die dorsale Beckenanstützung flacher oder höher angesetzt werden **4**. Das Sattelkorsett ist im Winkel und in der Höhe verstellbar, **5** so dass das Kind von der Vorneigung bis zum aufrechten Gang eine optimale Position einnimmt.



Für wen ist der Sattel besonders geeignet?

Kinder, die kaum bis keine Haltung im Becken- und Torsobereich aufweisen und stark hypoton sind. Sie sinken immer wieder ab.

Motilo Style



Für wen ist der Sattel besonders geeignet?

Kinder, die bereits Muskulatur aufbauen konnten oder für bestimmte Zeit eine Position halten können.

Der offene Sattel

Der offene Sattel kommt ohne dorsale Rückenstütze aus. Die ventrale / laterale Stütze **1** dient dem Anstützen und hat das Ziel, das Kind zu mobilisieren sowie den möglichst freien Gang zu fördern. Der horizontale Sattelsteg **2** kann individuell in der Schritttiefe angepasst werden. Bei einem kurzen Sattelsteg ist das Sitzen beispielsweise kaum noch möglich. Der individuell definierte kurze oder lange Sattelsteg kann somit therapeutisch eingesetzt werden, um den Gang zu fördern und ein Absitzen zu verhindern. Auch der offene Sattel ist im Winkel und in der Höhe verstellbar **3**.



Für wen ist der Sattel besonders geeignet?

Kinder, welche ventrale und laterale Unterstützung brauchen und bei denen das Gangbild gefördert werden soll.

WE EMPOWER KIDS

Motilo EVO

Erhältlich ab
Anfang 2025!



Der Motilo EVO ist seit September 2024 das neueste Modell der Motilo-Reihe. Anders als die anderen Sattelkorsetts ist der Motilo EVO nicht maßgefertigt. Der Sattel ist für unterschiedliche Bedürfnisse ausgerichtet und bietet eine optimale laterale Unterstützung für Kinder mit Haltungs- und Gleichgewichtsproblemen. Einstellbare ventrale **1** und dorsale **2** Pelotten bieten eine optimale große Unterstützungsfläche. Der Gurt **3** führt und fixiert zusätzlich die achsiale Rumpf-Thorsolinie, um ein ergonomisches Gangbild zu ermöglichen. Zudem ist der Motilo EVO auch in der Höhe **4**, Tiefe **5** sowie der Breite **6** einstellbar, um die Haltung und die Gangbildung optimal zu unterstützen. Der Motilo-EVO-Sattel ist in 3 verschiedenen Größen erhältlich.

Für wen ist der Sattel besonders geeignet?

Kinder mit Haltungs- und Gleichgewichtsproblemen sowie mit Funktions- und Mobilitätsbeeinträchtigungen.



Foto freepik



[_finchtec_](#)

finchtec GmbH
Im Winkel 1
39326 Colbitz OT Lindhorst

Tel: 039202 69119
Fax: 039202 69112

E-Mail: info@finchtec.de
www.finchtec.de

